

# ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mg・12mgを ご使用になる方へ

## 特徴

簡便な  
A→B→C 溶解操作

投与量の設定は  
最初の一度だけ

使い捨てタイプで  
いつでも衛生的

針を隠す  
ニードルガード

ペンシールで  
お気に入りに




※イラストはジェントロピン®ゴークイック  
注用12mgです。




## 注意点

- 薬の溶解前に黒色のリングをまわさないでください**  
(使いはじめのペンは溶解操作時の空気抜き用に最小注入量が設定されています)

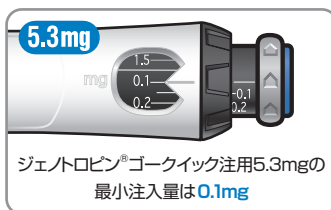

ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mgの  
最小注入量は**0.1mg**

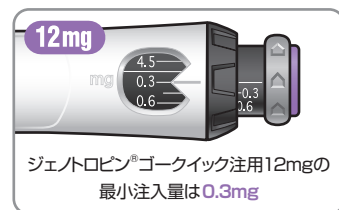

ジェントロピン®ゴークイック注用12mgの  
最小注入量は**0.3mg**

- 薬の溶解から空気抜き操作の際は  
注射針側を真上に向けてください**  
(「ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mg・12mgの使い方」P10-13参照)
- 灰色のダイヤルは逆にまわさないでください  
実投与量のリセットはできません**  
(「ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mg・12mgの使い方」P15、P26参照)
- 針を抜くまで注射ボタンは  
押したままにしてください**  
(「ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mg・12mgの使い方」  
P16-17、20-21、27-29、33-34参照)
- ニードルガードは使い捨てではありません**  
(「ジェントロピン®ゴークイック注用5.3mg・12mgの使い方」P24参照)

低身長、成長障害、成長  
ホルモン療法の情報サイト

**成長相談室**

ファイザー 成長相談室

検索

<http://ghw.pfizer.co.jp/treatment/patient/goquick/>

成人の成長ホルモン分泌  
不全症と下垂体機能低下  
症の情報サイト

**成人の成長ホルモン分泌不全症**

<http://ghw.pfizer.co.jp/adult/information/patient/goquick/>

ジェントロピンペン・ゴークイックの使い方に関するお問い合わせ  
[ジェントロピン相談窓口(注入器について)]



**0120-303-415**

★おくすりや治療については  
主治医にご相談ください。

24時間  
365日  
対応!



NEW

電話サポート予約サービス ご指定の日時にお電話します

<http://ghw.pfizer.co.jp/tel-yoyaku/>